





HURTIGGUIDE
NORSK

icare
ic100

Kun Rx

SLÅ PÅ TONOMETERET OG SETT INN PROBEN

1. Slå på tonometeret ved å trykke på valg- eller måleknappen. Nedenfor har vi illustrert oppstartsalternativene:
(Husk å bruke håndleddstroppen.)

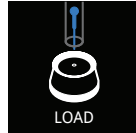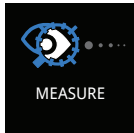

Trykk på valgknappen.

Trykk på måleknappen.

2. Åpne probesynderen ved å fjerne lokket og sett proben inn i probebasen, som vist på tegningen.




3. Når pilen vises på displayet, er tonometeret klart til bruk.





MÅLING

- Trinn 1.** Be pasienten om å slappe av og se rett fram på et fast punkt.
Før tonometeret nært pasientens øye.

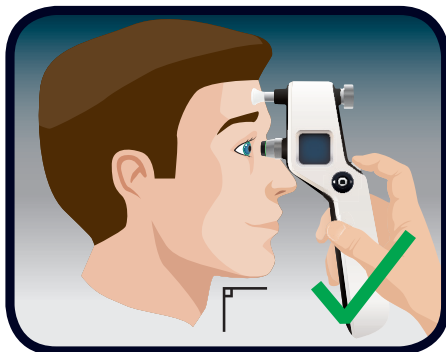

Trinn 2. Hold proben horisontalt, i rett vinkel mot midten av hornhinnen. Avstanden fra tuppen av proben til pasientens hornhinne bør være 4–8 millimeter. Indikatorlampen på probens base skal lyse grønt.

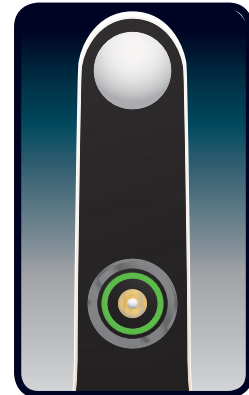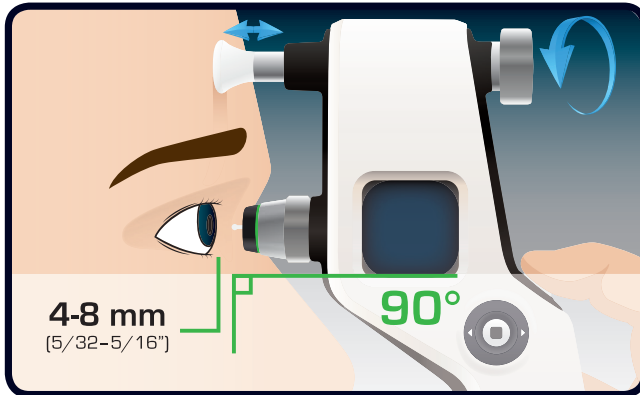

Grønt lys på probebasen.

Trinn 3. Trykk på måleknappen for å måle intraokulært trykk (IOP).

Proben berører øyet under målingen: Trykk og hold knappen inne for å ta seks målinger på rad **ELLER** trykk raskt på knappen seks ganger for å ta én måling om gangen.



ET KORT LYDSIGNAL —

Indikerer en korrekt enkeltmåling.


TO ETTERFØLGENDE LYDSIGNALER — —

Indikerer en gal enkeltmåling. (Se feilmeldinger i den komplette bruksanvisningen.)

LANGT LYDSIGNAL — — — —

Indikerer at det er gjort seks vellykkete målinger, og at måleresultatet for intraokulært trykk er synlig på displayet.

VISNING MENS MÅLING PÅGÅR

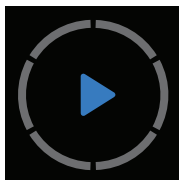

Før



Etter andre måling



Etter sjettemåling




Etter den sjettemålingen, med akseptabel variasjon



Etter den sjettemålingen, men med stor variasjon

TONOMETERETS DELER

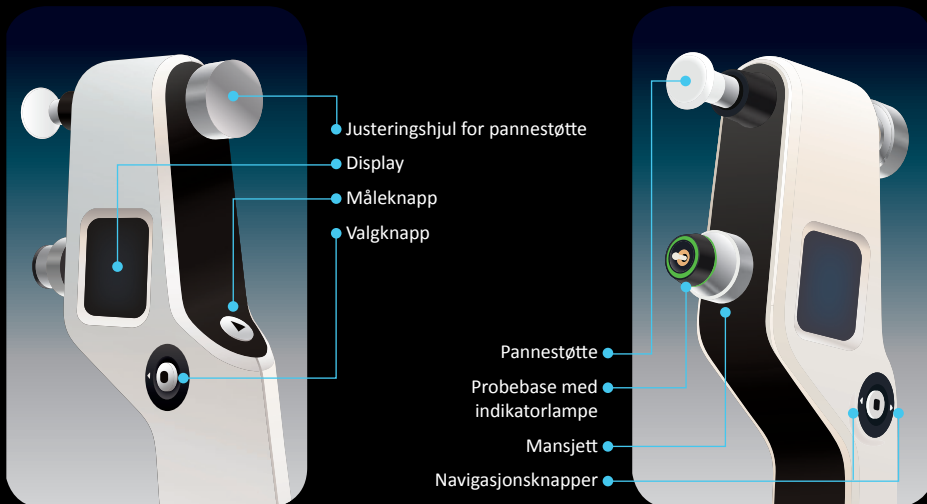

SKIFT/RENGJØR PROBEBASEN JEVNLIG FOR Å UNNGÅ UNØDVENDIG SERVICE

RENGJØRING AV PROBEBASEN

Probebasen kan brukes om igjen når den er grundig rengjort. Sørg for at probebasen er helt tørr før bruk.

1. Skru løs mansjetten på probebasen og fjern probebasen forsiktig fra tonometeret.
2. Snu probebasen opp–ned over en beholder fylt med 70–100 % alkoholløsning. Slipp probebasen ned i beholderen og la den ligge i løsningen i 5–30 minutter.
3. Blås probebasen tørr med trykkluft.
4. Sett den helt tørre probebasen forsiktig på plass og skru mansjetten fast på tonometeret igjen.

Se bruksanvisningen hvis du trenger mer detaljerte instruksjoner for skifte og rengjøring av probebasen.



www.icaretonometer.com

Du finner ytterligere informasjon i bruksanvisningen.